



Anleitung zur Probengewinnung




Bitte füllen Sie das gesamte Auftragsformular gut lesbar mit einem Kugelschreiber aus und drucken die Patientendaten mit einem Drucker in das dafür vorgesehene Feld.

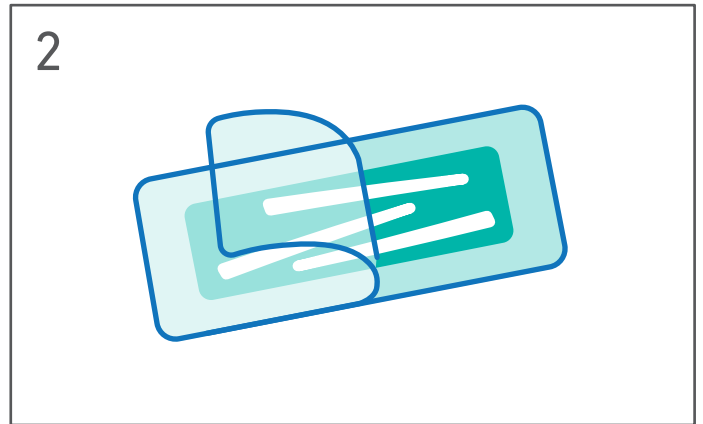

Entnehmen Sie die Papierspitzen und wählen Sie die Stellen, die Sie beproben möchten aus.

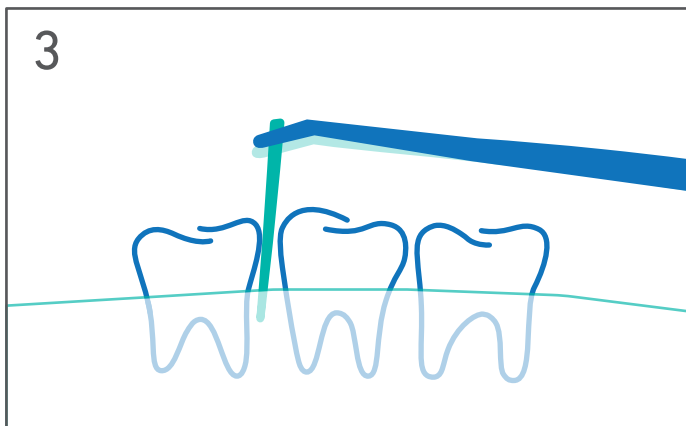

VOR DER PROBENENTNAHME supragingivale Beläge entfernen und die Stellen trockenlegen (keine professionelle Zahnreinigung). Mit einer sterilen Pinzette die Papierspitzen in die ausgewählten Zahnfleischtaschen einführen und ca. 20-30 Sekunden dort belassen.

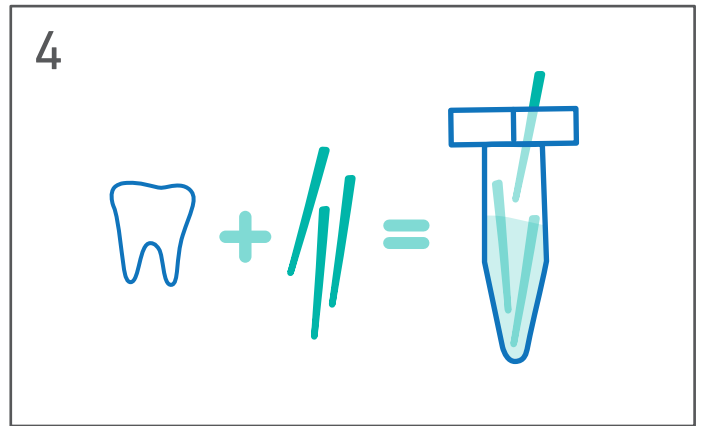

Für die Analyse werden die Proben der Zahnfleischtaschen zusammengefasst. Daher bitte alle Papierspitzen in ein Röhrchen geben.



Die maximale Taschentiefe, Probenentnahmestellen und ggf. weitere Angaben zum Patienten (wie z.B. Antibiotikaunverträglichkeiten) auf dem Auftragsformular eintragen.



Den Laborauftragsbogen zusammen mit den Proben im Freiumschlag protofrei an uns senden. Die Ergebnisse gehen Ihnen auf dem gewünschten Weg zu.