

Praktische Tipps für Einsender, die **nicht** unser LOEM (Labor Order Entry Modul) verwenden

Barcodierung von Proben und Anforderungsscheinen

Die eindeutige, sichere Beschriftung von Anforderungsscheinen und Proben ist essentiell für eine schnelle und korrekte Laboranalytik. Eine Vielzahl von vermeidbaren Probenverwechslungen entsteht durch falsche bzw. fehlerhafte Barcodierung. Folgende Hinweise und Tipps können Ihnen helfen, Fehler zu vermeiden.




Pat ID:


Patientenidentifikation Barcode Etiketten (Best.-Nr. 114100)

Bestellen Sie diesen Artikel bei unserem Partner Intermed:


Freecall: 0800 08 50-113 Freefax: 0800 08 50-114 www.intermed.de

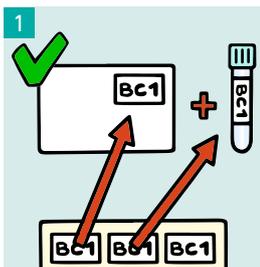

Jede Probe und jeden Anforderungsschein bitte mit einem Barcode des **gleichen Barcode-Abschnitts** bekleben.

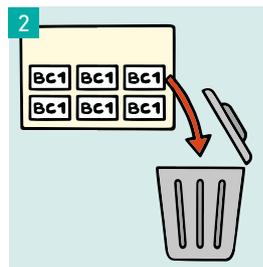


Überzählige Barcodes des Barcode-Abschnitts bitte entsorgen.

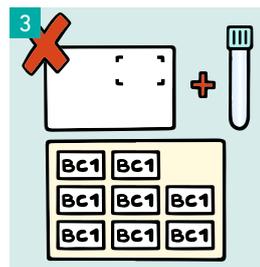


Fehlende Barcodes


führen zu Proben- bzw. Patientenverwechslungen. Anforderungsscheine und Proben können in unserer Laborsoftware nicht eindeutig zusammengeführt werden.

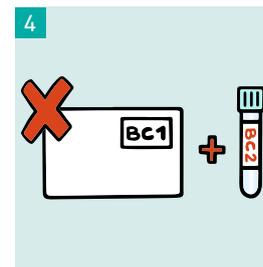


Barcodes vom selben Barcodeblatt bzw. mit derselben Auftragsnummer auf Anforderungsschein und Proben kleben! Unterschiedliche Auftragsnummern (z.B. BC1 und nicht identischer BC2) sorgen dafür, dass Proben falsch zugeordnet werden und die gewünschte Analytik nicht durchgeführt wird.

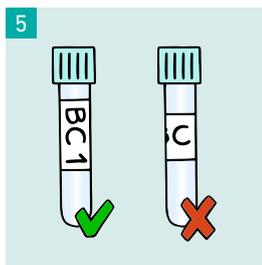


Der Barcode sollte **senkrecht auf mittlerer Höhe entlang des Röhrchens** geklebt werden. Die Laborgeräte können die Barcodes sonst nicht lesen.

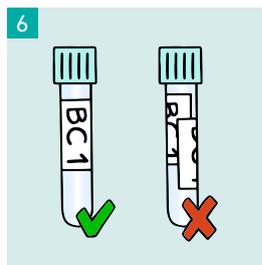

Bitte nur **einen Barcode pro Probe** verwenden! Wenn der falsche Barcode von den Laborgeräten gelesen wird, werden Ergebnisse den falschen Patienten zugeordnet.

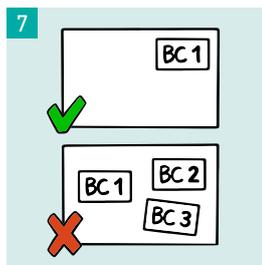

Bitte nur **einen Barcode pro Anforderungsschein oder Probe** verwenden! Bei mehreren Barcodes ordnen die Hochleistungsscanner den Anforderungsschein sonst fälschlicherweise mehreren Patienten zu. Die falsche Analytik wird durchgeführt.

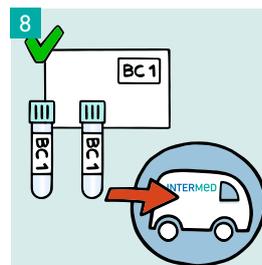

Nach **korrekter Beklebung** der Proben und des Anforderungsscheins kann die Probe über unseren Fahrdienst Intermed versandt werden.

Sie wünschen eine Laboranforderung per Mausklick und einen Barcode-Drucker in Ihrer Praxis? Die Vorteile und den Leistungsumfang der digitalen Laborbeauftragung durch LOEM – unser Labor Order Entry Modul – finden Sie unter: www.LADR.de/service/dienstleistungen/dfue/loem



Im LADR Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen werden Sie gerne beraten.

LADR Laborzentrum Baden-Baden
T: 07221 21 17-0

Hormonzentrum Münster
T: 0251 871 13-23

LADR Laborzentrum Nord-West, Schüttorf
T: 05923 98 87-100
Zweigpraxis Leer
T: 0491 454 59-0

MVZ Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH
Kaiserslautern
T: 0631 303 24-0

LADR Laborzentrum Berlin
T: 030 30 11 87-0

LADR Laborzentrum an den Immanuel Kliniken, Hennigsdorf
T: 03302 20 60-100
Zweigpraxis Bernau, Zweigpraxis Rüdersdorf

LADR Laborzentrum Paderborn
T: 05251 28 81 87-0

Partner des Laborverbundes:
LIS Labor im Sommershof, Köln
T: 0221 93 55 56-0

LADR Laborzentrum Bremen
T: 0421 43 07-300

LADR Laborzentrum Neuruppin
T: 03391 35 01-0

LADR Laborzentrum Recklinghausen
T: 02361 30 00-0

LADR Der Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen GbR
Lauenburger Straße 67
21502 Geesthacht
T: 04152 803-0
F: 04152 803-369
interesse@LADR.de

LADR Laborzentrum Hannover
T: 0511 901 36-0

LADR Laborzentrum Nord, Flintbek
T: 04347 90 80-100
Zweigpraxis Eutin

LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen, Geesthacht
T: 04152 803-0

Der Laborverbund dient ausschließlich der Präsentation unabhängiger LADR Einzelgesellschaften.

