

# Präanalytik urogenitaler Infektionen

Verfahren Erreger Erkrankung	Material Entnahmeort	Abstrich	Punktat o. ä.	Urin
<b>Kultur</b>		Anus, Bartholinischer Abszess, Genitalulkus, Harnröhre, Penis, Prostatasekret, Urethra, Vagina, Vaginalsekret, Vulva, Zervix	Biopsie, Douglaspunktat, Ejakulat/Sperma, Gewebe, Intrauterinpressar, Prostatasekret	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mittelstrahlurin</li> <li>Katheterurin</li> <li>Erststrahlurin</li> </ol> je 5–10 ml
<b>Bakterielle Erreger und Resistenz (E&amp;R) Pilze/Hefen MRSA/MRE Mykoplasmen</b>		453311C (Standard) oder 454220 (dünn)	Becher, einfach steril verpackt 109434 oder Transportbehälter, doppelt steril verpackt (nur für den OP-Saal) 108933 (20 ml) 452614 (60 ml)	<ol style="list-style-type: none"> <li>oder</li> <li>  260323/260330 Becher und Deckel   261631   103409           </li> </ol>
<b>Gardnerella vaginalis Gonokokken (Neisseria gonorrhoeae)</b>		454220 (dünn)	Nicht möglich	Nicht möglich
<b>B-Streptokokken-Screening Vaginal-/Rektalabstrich</b>		453311C (Standard) oder 454220 (dünn)		<ol style="list-style-type: none"> <li>  260323/260330 Becher und Deckel   399153           </li> </ol>
<b>PCR</b>				
<b>Chlamydien-PCR (Chlamydia trachomatis)</b>		453311C (Standard) oder 454220 (dünn)		<ol style="list-style-type: none"> <li>  260323/260330 Becher und Deckel   399153           </li> </ol>
<b>Gonokokken-PCR (Neisseria gonorrhoeae)</b>		451321 (nur für Frauen)		
<b>Mykoplasmen-PCR (Mycoplasma genitalium/hominis; Ureaplasma parvum/urealyticum)</b>		453311C (Standard)	Becher, einfach steril verpackt 109434 oder Transportbehälter, doppelt steril verpackt (nur für den OP-Saal) 108933 (20 ml) 452614 (60 ml)	<ol style="list-style-type: none"> <li>  260323/260330 Becher und Deckel   261631           </li> </ol>
<b>Trichomonaden-PCR (Trichomonas vaginalis)</b>		453311C (Standard)		
<b>Ulcus molle (Haemophilus ducreyi)</b>		454220 (dünn)		
<b>Herpes-PCR (Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2)</b>		454220 (dünn)		
<b>Syphilis (Lues) (Treponema pallidum)</b>		454220 (dünn)		
<b>Varizellen, Herpes Zoster (Varizella-Zoster-Virus)</b>		454220 (dünn)		
<b>HPV-PCR (Humane Papillomviren)</b>		106333 <b>Nur für HPV-PCR!</b>		Urin ist für diese Diagnostik ungeeignet, da analytische Sensitivität und Spezifität der jeweiligen PCR durch die Verdünnung nicht beurteilbar werden und damit die Ergebnisse keine Aussagekraft haben.