

### NaTALIA Pränataltest

# Anleitung zur Blutentnahme und zum Versand der Blutproben

#### Inhalt des NaTALIA Pränataltest

##### Entnahmesets (Best.-Nr. 187999):

- Anforderungsschein NaTALIA Pränataltest
- Anleitung zur Blutentnahme und zum Versand der Blutproben
- Vacutainer Blutentnahme-Röhrchen (Streck Tube)
- Vacutainer Butterfly Safety-Lok
- Vacutainer-Halter
- Schutzgefäß für das Blutröhrchen mit saugfähiger Einlage (für den Rückversand)
- Druckverschlussbeutel
- Rücksendebox
- Informations-Flyer für Patienten

#### Vorgehen bei der Blutentnahme

Beschriften Sie das Blutentnahme-Röhrchen mit Name, Vorname, Geburtsdatum und kleben Sie den Barcode auf.

1. Drehen Sie das Butterfly Safety-Lok Blutentnahmeset in den Vacutainer-Halter.
2. Führen Sie die Venenpunktion am gesenkten Arm durch. Eine kleine Menge Blut fließt in den Schlauch.
3. Stecken Sie das Blutentnahme-Röhrchen vollständig in den Halter und durchstechen Sie den Gummipfropfen. Das Vakuum wird freigegeben und das Röhrchen füllt sich. Halten Sie das Röhrchen bei der Entnahme




aufrecht. Wenn es sich ganz gefüllt hat, ziehen Sie es aus dem Halter.

#### 4. Wichtig! Drehen Sie das Röhrchen 10 Mal über Kopf.

#### Lagerung und Versand der Proben

- Die Blutproben können bei Raumtemperatur gelagert werden (nicht unter 6°C und nicht über 37°C).
- Zum Versand Blutproben in die Umverpackung geben und mit dem ausgefüllten Untersuchungsauftrag in die Transportbox legen
- Die Proben können wie gewohnt mit dem Fahrdienst ins Labor befördert werden.
- Für eine gesonderte Abholung wenden Sie sich gern an unseren Partner Intermed Logistik, T: 0700 88 21-80 00 (Festnetzpreis max. 14 ct./Min., Mobilfunktarife abweichend), [logistik@intermed.de](mailto:logistik@intermed.de)

- Die Proben sollten am Tag der Entnahme in Ihrem LADR Labor vor Ort eintreffen, das den Transport an das LADR Laborzentrum Recklinghausen organisiert.
- Bitte planen Sie die Blutentnahme so, dass die Proben innerhalb von 2 Tagen in unserem LADR Laborzentrum Recklinghausen eintreffen (**Blutentnahme von Montag bis Mittwoch**).

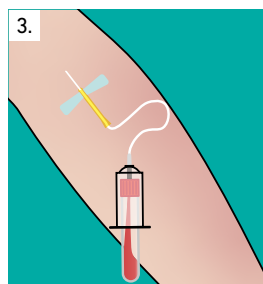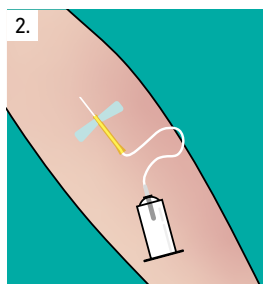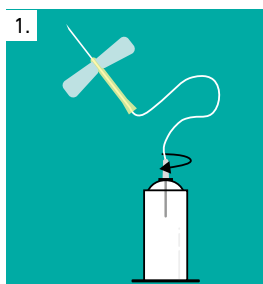

## NaTALIA Pränataltest Entnahmeset:

Nicht-invasiver Pränataltest (NIPT)


**NaTALIA** Pränataltest



- Trisomie 21 (Down-Syndrom)
- Trisomie 18 (Edwards-Syndrom)
- Trisomie 13 (Patau-Syndrom)
- Monosomie X (Turner-Syndrom)

LADR Der Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen

**Sie haben noch Fragen?**  
Alle (Fach-) Informationen für Ärzte und Patienten sowie ein Aufklärungsvideo zum NaTALIA Pränataltest finden Sie unter

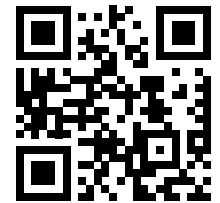

[www.LADR.de/nipt](http://www.LADR.de/nipt)

Zur Durchführung des NaTALIA Pränataltests steht das LADR Entnahmeset zur Verfügung (Best.-Nr. 187999).

Bestellen Sie diesen Artikel bei unserem Partner Intermed:

**Freecall: 0800 08 50-113 • Freefax: 0800 08 50-114 • [www.intermed.de](http://www.intermed.de)**

## Im LADR Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen werden Sie gerne beraten.

**LADR Laborzentrum  
Baden-Baden**  
T: 07221 21 17-0

**LADR Laborzentrum  
Berlin**  
T: 030 30 11 87-0

**LADR Laborzentrum  
Braunschweig**  
T: 0531 310 76-100

**LADR Laborzentrum  
Bremen**  
T: 0421 43 07-300

**LADR Laborzentrum  
Hannover**  
T: 0511 901 36-0

**Hormonzentrum  
Münster**  
T: 0251 871 13-23

**LADR Laborzentrum  
an den Immanuel Kliniken,  
Hennigsdorf**  
T: 03302 20 60-100  
**Zweigpraxis Bernau,  
Zweigpraxis Rüdersdorf**

**LADR Laborzentrum  
Neuruppin**  
T: 03391 35 01-0

**LADR Laborzentrum  
Nord, Flintbek**  
T: 04347 90 80-100  
**Zweigpraxis Eutin**

**LADR Laborzentrum  
Nord-West, Schüttorf**  
T: 05923 98 87-100  
**Zweigpraxis Leer**  
T: 0491 454 59-0

**LADR Laborzentrum  
Paderborn**  
T: 05251 28 81 87-0

**LADR Laborzentrum  
Recklinghausen**  
T: 02361 30 00-0

**LADR Zentrallabor  
Dr. Kramer & Kollegen,  
Geesthacht**  
T: 04152 803-0

Partner des Laborverbundes:  
**LIS Labor im Sommershof,  
Köln**  
T: 0221 93 55 56-0

**LADR Der Laborverbund  
Dr. Kramer & Kollegen GbR**  
Lauenburger Straße 67  
21502 Geesthacht  
T: 04152 803-0  
F: 04152 803-369  
[interesse@LADR.de](mailto:interesse@LADR.de)

Der Laborverbund dient ausschließlich der Präsentation unabhängiger LADR Einzelgesellschaften.

